

Instrukcja obsługi Twojej opaski

Locon Life Plus



1. Ładowanie

Przyłóż dołączony w pudełku kabel do magnetycznego złącza z tyłu urządzenia



Podłącz do ładowarki po usłyszeniu komunikatu o niskim stanie baterii

2. Jak wysłać SOS

Wciśnij i **przytrzymaj** przycisk przez 3 sekundy

Przycisk 

Po informacji „Uruchomiono SOS” urządzenie łączy się z ratownikiem medycznym lub opiekunem



3. Pomiar ciśnienia

Wciśnij przycisk raz a pomiar ciśnienia zacznie się automatycznie

Przycisk 



Czas pomiaru ciśnienia to 1 minuta

4. Pomiar temperatury

Wciśnij przycisk 3 razy następnie **przytrzymaj** go przez 3 sekundy a pomiar temperatury nastąpi automatycznie

Przycisk 



Czas pomiaru temperatury to 30 sekund

5. Pomiar saturacji

Wciśnij przycisk 4 razy po czym nastąpi automatyczny pomiar saturacji

Przycisk 



Czas pomiaru saturacji to 1 minuta